



電解水素水整水器

TRIM ION NEO

本体標準価格(税抜) ¥164,000

■ 付属品



●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付 ●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m ●排水ホース(シングルタイプ)1.5m ●吸盤 ●ホース固定バンド ●pH測定キット

■ 交換用浄水カートリッジ(別売)

PREMIUM

マイクロカーボンCM+カートリッジ



標準価格(税抜) ¥9,500

■ 取り付けについて


取付アダプター

7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば、簡単に取付けることができます。



取り付けできない水栓

下記のような水栓をお使いの場合、付属の分岐水栓を取付けることができません。別途工事が必要となります。

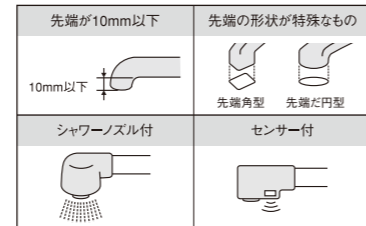

※その他にも変形水栓や、ねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがありますのでご注意ください。

■ トリムイオンNEO 主な仕様

医療機器製造販売認証番号	221AGBZX00290000	定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50-60Hz	定 格 電 流	AC4.5A
定 格 電 解 電 圧	DC50V(max.)	消 費 電 力	約260W
待 機 電 力	約0.5W	電 極 (枚 数)	プラチナコーティング電極(5枚)
生 成 水 取 水 方 式	2ウェイ方式	電 解 槽	4槽(8セル)
定 格 取 水 量	電解水素水約4リットル/分(max.)、酸性水約4リットル/分(max.)、 浄水約5リットル/分(max.)		
使用可能配管水圧	50kPa(最低動作水圧)~700kPa		
本 体 重 量	約3kg	電 源 コ ー ド 長	約2.7m
本 体 寸 法	276(W)×248(H)×112(D)mm		
浄水カートリッジろ過能力	JIS規格13物質*1を約7トン(除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) 浄水器協会自主規格3物質*2を7トン(除去率80%以上) 浄水器協会規格基準の試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) (使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日19リットル使用した場合で、 約1年間使用できます。) ※1、※2 4ページをご参照ください。		
電 解 槽 洗 浄 方 式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式		
電 源 回 路	スイッチング・レギュレーター制御方式		
本 体 保 護 機 能	ヒューズ(基板内蔵):8A、分岐水栓定流量弁、分岐水栓警告弁(過大水圧防止)、 定電流制御回路(過電流防止装置)、過熱防止装置		

※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。
※製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。

⚠ 安全上のご注意

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●飲用に適合した水(水道水など)以外には使用しないでください。 ●35℃を超えるお湯を本体側に通さないでください。 ●pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しないでください。 ●次のような水は飲用しないでください。(1)酸性水、(2)排水ホースから出る水、(3)pH測定液が入った水 ●医薬品を電解水素水で併飲しないでください。 ●次の方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。(1)医師の治療を受けている方、(2)腎臓に障害がある方、(3)身体に異常を感じている方 ●電解水素水を飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状が改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談してください。 ●次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。(1)肌の弱い方、(2)アレルギー体質の方 ●酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。 ●電解水素水はpH9.5が飲用に適していますが、初めて飲用する方は水素レベル1で少量から飲用してください。 ●電解水素水は、1日当たり500~1000ミリリットルを目安に飲用してください。 ●生成水は生成後なるべく早く使用してください。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

お求め、お問い合わせは

(社)日本経済団体連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事
(社)日本病院会会員 (社)日本ホームヘルス機器協会正会員

株式会社日本トリム 東証一部(証券コード:6788)

本社 / 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー 22F
TEL.06-6456-4600(代)

支社 / 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・福岡
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <http://www.nihon-trim.co.jp/>

■製造販売元
株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
〒783-0060 高知県南国市蛸が丘1-5-2



ISO9001:2008 FM 96904
ISO13485:2003 MD 96902

TRIM
NIHON TRIM CO.,LTD.



ウォーター
ヘルスケアという、
新習慣。



連続生成型電解水素水整水器

TRIM ION NEO

医療機器製造販売認証番号: 221AGBZX00290000